

Contour next link 24

Ασύρματο Σύστημα Παρακολούθησης Γλυκόζης Αίματος



Χρησιμοποιεί μόνο ταινίες μέτρησης γλυκόζης αίματος CONTOUR®NEXT



ASCENSIA Diabetes Care

Medtronic

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Μετρητής

Αντλία



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιλέξτε τις μονάδες μέτρησης του μετρητή σας. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήστη του μετρητή σας για αναλυτικές οδηγίες.

90004319 Rev. 07/19

Αρχική Εγκατάσταση Μετρητή και Σύνδεση με Αντλία Ινσουλίνης MiniMed® 640G

Φόρτιση μετρητή

- 1** Βγάλτε το καπάκι USB για να αποκαλυφθεί το βύσμα USB.



Ο μετρητής CONTOUR®NEXT LINK 2.4 που διαθέτετε έχει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία.


Φορτίστε τον μετρητή σας με τον φορτιστή τοίχου* ή συνδέοντας το βύσμα USB σε έναν υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος.

Ο μετρητής σας θα εμφανίσει σύντομα το μήνυμα «Μην Κάνετε Μέτρηση-Φορτίζει» και το φως της θύρας ταινιών μέτρησης θα αναβοσβήνει. **Δεν μπορείτε να κάνετε μέτρηση γλυκόζης αίματος ενώ η μπαταρία φορτίζει.**


Όταν η φόρτιση τελειώσει, το φως της θύρας ταινιών μέτρησης θα σβήσει. Αποσυνδέστε τον μετρητή CONTOUR NEXT LINK 2.4 για να κάνετε μέτρηση.

Αποσυνδέστε τον Μετρητή από την Πηγή Φόρτισης Προτού Ξεκινήσει η Ρύθμιση

- 2** Για να ξεκινήσει η ρύθμιση, κρατήστε πατημένο το κουμπί Menu για αρκετά δευτερόλεπτα μέχρι να ενεργοποιηθεί ο μετρητής.

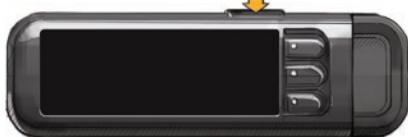

- 3** Κάντε κύλιση προς τα κάτω για να επιλέξετε τη γλώσσα σας. Πατήστε OK.

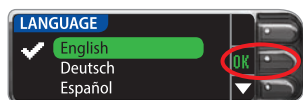

Το παράδειγμα σε αυτή την οθόνη παρουσιάζει τις επιλογές γλώσσας. Η σειρά των γλωσσών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα σας.


- 4** Πατήστε OK εάν εμφανίζεται η σωστή γλώσσα. Πατήστε OXI εάν εμφανίζεται η λάθος γλώσσα.

Σύνδεση με Αντλία

- 5** Σύνδεση με Αντλία MiniMed; Πατήστε OK.




- 6** Πατήστε OK.

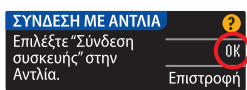

- 7** Αφήστε κάτω τον μετρητή και κρατήστε την αντλία σας.

Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να ενεργοποιήσετε την οθόνη, κατόπιν πατήστε το κουμπί Μενού. Χρησιμοποιήστε το βέλος προς τα κάτω για να κάνετε κύλιση στα **Εργαλεία**.


Πατήστε το κουμπί Επιλογή.

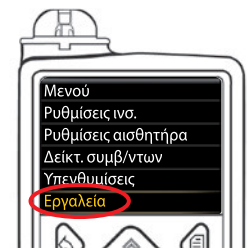

Αν η οθόνη της αντλίας σβήσει, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να την ανάψετε ξανά.


- 8** Στο μενού Εργαλεία, χρησιμοποιήστε το βέλος προς τα κάτω για να κάνετε κύλιση στις **Επιλογές συσκευής**.

Πατήστε το κουμπί Επιλογή.

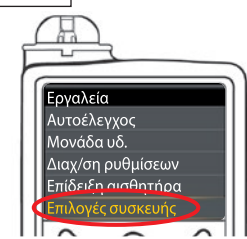


- 9** Στο μενού Επιλογές συσκευής, κάντε κύλιση έως την επιλογή **Σύνδεση συσκευής**.

Πατήστε το κουμπί Επιλογή.

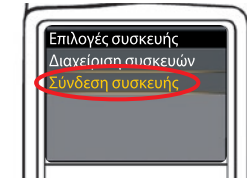

- 10** Τοποθετήστε τον μετρητή και την αντλία δίπλα-δίπλα. Επιλέξτε **Αυτ. σύνδεση** στην αντλία σας.


Επιλέξτε **Αυτ. Σύνδεση** στον μετρητή σας.

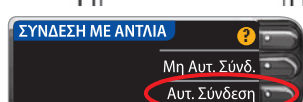

- 11** Διαβάστε την οθόνη αντλίας, χρησιμοποιώντας το βέλος προς τα κάτω για να κάνετε κύλιση στην επόμενη σελίδα.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να κάνετε κύλιση στο **Συνέχιση**.



Πατήστε το κουμπί Επιλογή.

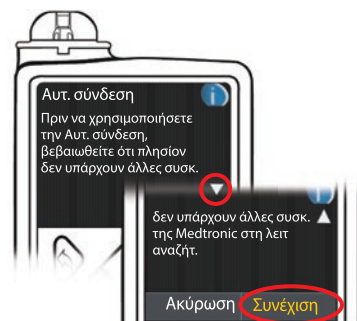

- 12** Τοποθετήστε τον μετρητή και την αντλία δίπλα-δίπλα. Επιλέξτε **Αναζήτηση** στην αντλία.

Επιλέξτε **Αναζήτηση** στον μετρητή.



Αυτή η αναζήτηση μπορεί να διαρκέσει έως 2 λεπτά.

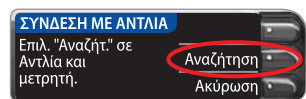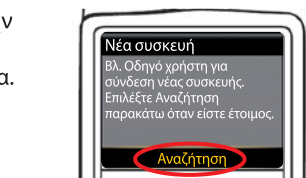

- 13** Ελέγξτε να δείτε αν ο SN Συσκευής (σειριακός αριθμός) στην **αντλία** είναι ίδιος με τον SN Συσκευής στον **μετρητή**.


Αν είναι οι ίδιοι, κάντε κύλιση στο **Επιβεβ/ση** στην αντλία.

Πατήστε το κουμπί Επιλογή.

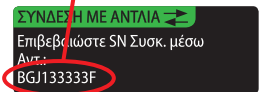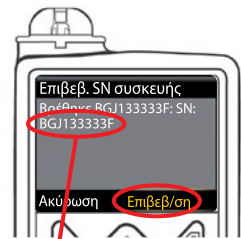


Όταν η αντλία συνδέεται με τον μετρητή, ο SN στην οθόνη του μετρητή θα αλλάξει σε έναν διαφορετικό σειριακό αριθμό. Αυτός ο αριθμός είναι ο SN της **αντλίας**.


- 14** Αναποδογυρίστε την αντλία. Βεβαιωθείτε ότι ο SN στο πίσω μέρος της **αντλίας** είναι ίδιος με τον σειριακό αριθμό της αντλίας τώρα στην οθόνη του **μετρητή**. Πατήστε **Επόμενο**.

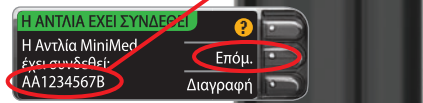


- 15** Επιλέξτε **Πάντα** και πατήστε το κουμπί OK στην επόμενη οθόνη.

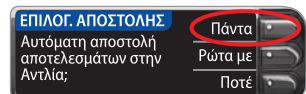

- 16** Επιλέξτε **Μορφή Ημερομηνίας**.

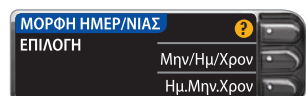


- 17** Πατήστε OK. Σημείωση: Αν η ώρα και ημερομηνία δεν είναι σωστές, μπορείτε να τις αλλάξετε στην αντλία.

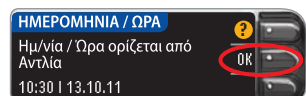

- 18** Πατήστε **Αποδοχή** για να επιλέξετε **AutoLog Κλειστό**.

Το AutoLog σας επιτρέπει να επισημάνετε ένα αποτέλεσμα μέτρησης ως Σε Νηστεία, Πριν Γεύμα ή Μετά Γεύμα. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήστη σας για να μάθετε περισσότερα.

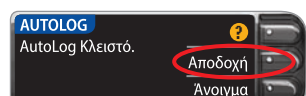

*Ο φορτιστής τοίχου μπορεί να μην περιλαμβάνεται σε όλα τα κιτ μετρητή. Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών για πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση ενός φορτιστή τοίχου.

Γυρίστε τη σελίδα για να ολοκληρωθεί η ρύθμιση. ➔

19 Αποδοχή ή Αλλαγή Ειδοποίησης Υψηλού/Χαμηλού.

Ο μετρητής σας ειδοποιεί με έναν ήχο όταν το επίπεδο της γλυκόζης του αίματός σας είναι πάνω ή κάτω από τα καθορισμένα επίπεδα σας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛ/ΧΑΜ	
Ανω: 250 mg/dL	Αποδοχή
Κατω: 70 mg/dL	Αλλαγή

20 Αποδοχή ή Αλλαγή του Εύρους Στόχου σας.

Το Εύρος Στόχου είναι ο στόχος σας για τα αποτελέσματα μέτρησης της γλυκόζης στο αίμα σας.

ΣΤΟΧΟΣ	
70 - 180	Αποδοχή
	Αλλαγή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ειδοποιήσεις μπορούν να ρυθμιστούν μόνο εκτός του επιλεγμένου Εύρους(ών) Στόχου σας. Οι στόχοι μπορούν να ρυθμιστούν μόνο μέσα στο επιλεγμένο επίπεδο(α) Ειδοποίησης σας. Για επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών. Ανατρέξτε στα στοιχεία επικοινωνίας της Εξυπηρέτησης Πελατών παρακάτω.

21 Η εγκατάσταση του συστήματός σας έχει ολοκληρωθεί πλέον και είναι έτοιμο να εκτελέσει μία μέτρηση γλυκόζης αίματος. Μεταβείτε στο Βήμα 1 παρακάτω.

✓ Ρύθμιση ολοκληρώθηκε. Εισάγετε ταινία για να ξεκινήσετε μια μέτρηση.

Υλικά για Μέτρηση



Ταινία μέτρησης CONTOUR®NEXT



Συσκευή Τρυπήματος



Βελόνα



Μετρητής γλυκόζης αίματος CONTOUR®NEXT LINK 2.4

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:


- Η συσκευή τρυπήματος προορίζεται για αυτομέτρηση από έναν ασθενή μόνο. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περισσότερα από ένα άτομα λόγω κινδύνου μόλυνσης.^{1,2}
- Χρησιμοποιήστε νέα βελόνα κάθε φορά που κάνετε μέτρηση γιατί παύει να είναι αποστειρωμένη μετά τη χρήση.
- Όλα τα εξαρτήματα του κιτ θεωρούνται βιολογικά επικίνδυνα απόβλητα και ενδέχεται να μεταδίδουν μολυσματικές ασθένειες, ακόμα και αφού εκτελέσετε καθαρισμό.
- Πλένετε πάντοτε τα χέρια σας καλά με σαπούνι και νερό και στεγνώνετε τα καλά πριν και μετά τη μέτρηση, τον χειρισμό του μετρητή, της συσκευής τρυπήματος ή των ταινιών μέτρησης.

Ανατρέξτε στον οδηγό χρήστη του μετρητή σας, για αναλυτικές οδηγίες για το καθαρισμό του μετρητή σας.


Μέτρηση του Αίματός σας

Λάβετε Σταγόνα Αίματος

1 Εισαγάγετε την ταινία μέτρησης και περιμένετε το μήνυμα **ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΑΙΜΑ**.

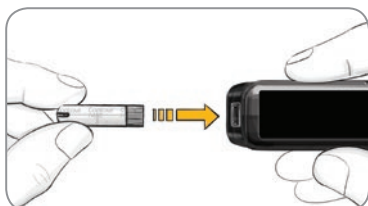


2 Αφαιρέστε το τερματικό καπάκι της συσκευής τρυπήματος. Εισαγάγετε τη βελόνα σταθερά στη συσκευή τρυπήματος, μέχρι να σταματήσει τελείως.

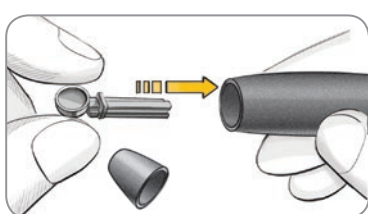

Τα γραφήματα της συσκευής τρυπήματος είναι μόνο για λόγους απεικόνισης. Η συσκευή τρυπήματος που διαθέτετε μπορεί να είναι διαφορετική. Ανατρέξτε στο ένθετο της συσκευής τρυπήματος που διαθέτετε για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την προετοιμασία της συσκευής τρυπήματος.

3 Επανατοποθετήστε το τερματικό καπάκι. Περιστρέψτε τον επιλογέα που είναι ενσωματωμένος στο τερματικό καπάκι, για να ρυθμίσετε το βάθος τρυπήματος.

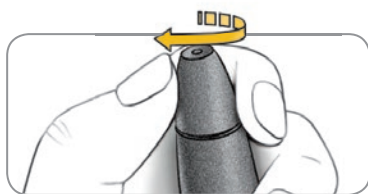

4 Λάβετε τη σταγόνα αίματός σας.



Μέτρηση Σταγόνας Αίματος

5 Ακουπήστε την άκρη της ταινίας μέτρησης στη σταγόνα του αίματος. Εάν η πρώτη σταγόνα αίματος δεν επαρκεί, ο μετρητής θα εκπέμψει δύο σύντομους χαρακτηριστικούς ήχους και θα εμφανίσει την οθόνη **ΑΝΕΠΑΡΚΕΣ ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ**. Έχετε στη διάθεσή σας περίπου 30 δευτερόλεπτα για να τοποθετήσετε περισσότερο αίμα στην ίδια ταινία.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν Αυτολογ Ανοιχτό, σας ζητείται να επισημάνετε το αποτέλεσμα σας ως Σε Νηστεία, Πριν Γεύμα ή Μετά Γεύμα πριν εμφανιστεί το αποτέλεσμα σας. Αν το αποτέλεσμα σας είναι πάνω από τη ρύθμιση για Ειδοποίηση Υψηλής Γλυκόζης ή κάτω από τη ρύθμιση για Ειδοποίηση Χαμηλής Γλυκόζης, θα δείτε το αποτέλεσμα σας χωρίς να χρειαστεί να κάνετε κάποια επιλογή Αυτολογ.

Αναφορές

- 1 US Food and Drug Administration. Use of fingerstick devices on more than one person poses risk for transmitting bloodborne pathogens: initial communication. US Department of Health and Human Services; update 11/29/2010. <http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm224025.htm>
- 2 Centers for Disease Control and Prevention. CDC clinical reminder: use of fingerstick devices on more than one person poses risk for transmitting bloodborne pathogens. US Department of Health and Human Services; 8/23/2010. <http://www.cdc.gov/injectionsafety/Fingerstick-DevicesBGM.html>

Αποστολή Αποτελεσμάτων στην Αντλία σας MiniMed

6 Αν στις **Επιλογές Αποστολής** επιλεγεί το **Πάντα** κατά τη διάρκεια της **Ρύθμισης**, τα αποτελέσματα θα αποστέλλονται απευθείας στην αντλία σας. Αν στις **Επιλογές Αποστολής** επιλεγεί το **Ρώτα με** κατά τη διάρκεια της **Ρύθμισης**, μπορείτε να επιλέξετε την αποστολή του αποτελέσματός σας στην αντλία σας μετά από κάθε μέτρηση γλυκόζης αίματος.



Πατήστε **Αποστολή** ή **Μη Αποστ.**

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ελέγχετε πάντα την οθόνη στην αντλία σας για να διασφαλιστεί ότι το αποτέλεσμα γλυκόζης που εμφανίζεται συμφωνεί με το αποτέλεσμα γλυκόζης που εμφανίζεται στον μετρητή.

Δόση, Υπενθύμιση και Σημειώσεις

7 Επιλέξτε **Δόση** για να στείλετε μία δόση στην αντλία σας. Επιλέξτε **Υπενθ/ση** για να ρυθμίσετε μία υπενθύμιση για την επόμενη μέτρησή σας. Επιλέξτε **Σημ/ώσεις** για να προσθέσετε περισσότερες πληροφορίες στο αποτέλεσμα.



Επιβεβαιώστε ότι το Αποτέλεσμα Εστάλη στην Αντλία

8 Πάρτε την αντλία σας. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Πίσω για να μεταβείτε στην αρχική οθόνη. Το αποτέλεσμα γλυκόζης του αίματός σας θα πρέπει να εμφανίζεται στην οθόνη αντλίας.



Απενεργοποίηση Μετρητή

9 Αφαιρέστε την ταινία μέτρησης και θα απενεργοποιηθεί ο μετρητής σε 3 λεπτά. Ή κρατήστε πατημένο το κουμπί Menu για να απενεργοποιήσετε τον μετρητή.



Ανατρέξτε στον οδηγό χρήστη του μετρητή σας CONTOUR NEXT LINK 2.4, στο ένθετο της συσκευής τρυπήματος και στον οδηγό χρήστη της αντλίας ινσουλίνης MiniMed για πλήρεις οδηγίες.

Για να δείτε τις ώρες λειτουργίας του τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών επισκεφτείτε τον διαδικτυακό τόπο www.diabetes.ascensia.com

+30 214 1000 999

Για πληροφορίες σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τις σχετικές άδειες χρήσης, βλ.: www.patents.ascensia.com

IVD Ιατροτεχνολογικό βοήθημα που χρησιμοποιείται για διάγνωση in vitro

ASCENSIA
Diabetes Care

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland



Το Ascensia, το λογότυπο Ascensia Diabetes Care, το Clinilog, το Contour, το Glucofacts και το λογότυπο No Coding είναι εμπορικά σήματα ή/και εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Τα Bolus Wizard, CareLink, Guardian, MiniMed και Paradigm είναι εμπορικά σήματα ή/και εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Medtronic MiniMed, Inc.

Medtronic

© 2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.